

Operative Exzellenz im Blickpunkt: Ein tiefer Einblick in die **Kosteneinsparungen bei Reagenzien und Arbeitszeit** mit Excelsior im Vergleich zum VIP für die Gewebeverarbeitung

Erarbeitet von: Becky DiLallo BS, HT(ASCP), Laboratory Manager

In der kostenbewussten Welt der klinischen Labore müssen wir alles, was wir kaufen, auf Notwendigkeit und Qualität prüfen. Natürlich betrachtete ich die Dinge unter dem Gesichtspunkt der Kosten, aber als Histologielaborantin ging es mir auch darum, die Arbeit im Labor erfassbarer und sicherer zu machen. Diese Ziele wollte ich bei der Kaufentscheidung eines neuen Gewebereinbetters berücksichtigen.

Die Gewebeverarbeitung mit dem EpreDia™ Excelsior™ Gewebereinbeter **reduziert im Vergleich zum VIP den Reagenzienverbrauch und den Zeitaufwand der Laboranten für das Auswechseln.**

Labore können mit Excelsior im Vergleich zum VIP fast das Dreifache der monatlichen Reagenzienkosten und der Zeit der Laboranten für die Gewebeverarbeitung einsparen.



„Der Excelsior bietet eine überragende Leistung, insbesondere wenn man seine erweiterten Funktionen berücksichtigt. Es gab weniger Kosten für Reagenzien, es musste weniger Zeit mit der Technik aufgewendet werden und es gab bessere Sicherheitsfunktionen. All diese Vorteile zusammen genommen zeigen, wer der klare Gewinner sein wird, wenn Sie sich für einen neuen Gewebereinbeter entscheiden müssen.“

Reagenzienverbrauch

Excelsior nutzt die Rotationstechnologie, um die Reagenzien optimal zu nutzen. Anstatt teure Reagenzien zu verwerfen, verwendet Excelsior sie, bis sie aufgebraucht sind. Die Reagenzienüberwachungsfunktion zeigt Ihnen an, dass die schlechtesten Reagenzien aus dem Gerät entfernt und ein neues Reagenz in das Gerät gegeben werden muss. Dadurch werden der Reagenzienverbrauch und der Zeitaufwand der Laboranten zur Wartung des Geräts erheblich reduziert.

EpreDia Excelsior Gewebereinbeter

- Qualität
- Beständigkeit
- Einfache Handhabung



Der Aufwand der Mitarbeiter für die Wartung des Gewebeeinbetters besteht in einem Histologielabor typischerweise aus dem wöchentlichen Austausch von Formalin und Reagenzien. Durch die Überwachung der spezifischen Dichte des ersten Alkohols warnt Excelsior den Nutzer dank der innovativen Technologie im Voraus, sobald die Reagenzien aufgebraucht sind. Zu diesem Zeitpunkt tauscht das Gerät die Reagenzien automatisch aus und weist das Labor darauf hin, es mit frischen Reagenzien zu befüllen.

Labormitarbeiter müssen Ihre Zeit nicht mehr mit dem Entsorgen oder Nachfüllen von Reagentien verbringen. Bedarfsgerechte Verwerfung und Beladung von Reagenzien schafft Freiräume um sich auf die wichtigsten Aspekte zu fokussieren: die Patientenproben.



Die gebrauchsfertigen farbcodierten 5-Liter-Reagenzien von Epredia unterstützen Sie in Ihrem Alltag.

Sicherheitsfunktionen	Excelsior	VIP
Lagerung mit Luftfilter (Mitarbeitersicherheit)	X	X
Alarme für Fehlfunktionen (Patientenversorgung)	X	X
Automatisierte Reagenzienentladung (Mitarbeitersicherheit)	X	
Überwachung der Reagenzienqualität (Patientenversorgung)	X	
Luftabsaugung beim Öffnen des Deckels (Mitarbeitersicherheit)	X	

Excelsior bietet die modernsten und umfangreichsten Sicherheitsfunktionen aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Routine-Gewebeeinbettern zu einem Bruchteil der Kosten.

Wenn Sie mehr über die einzigartigen Lösungen des Epredia Excelsior erfahren möchten, besuchen Sie epredia.com oder kontaktieren Sie unseren Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationen.

